

対象

リウマチなどで手が上がらない方。車椅子を利用されている方

方に便利な道具

ペットボトル開け

〈使用方法〉

逆さまに立て、キャップの方を固定し、容器の底を掴んで押しながら回す。密封部が切れたら戻して蓋を外す



牛乳瓶蓋開け器

〈使用方法〉

蓋の縁に開け器の頸を引っ掛けハンドルを持ち上げる

〈特徴〉

指先が不自由でも軽く開けられ、箱と組み合わせれば蓋を閉める場合にも使える



シャンプーエイド

〈使用方法〉

手の甲でレバーを押して掌で液を受ける

〈特徴〉

片手で操作が出来る



〈特徴〉

掌で掴んで回すので指先が不自由でも軽く開けられる

類似器具



ストローホルダー

〈使用方法〉

ホルダーをコップの縁に固定し、ホルダーの穴にストローを差し込む



〈特徴〉

ストローが固定されるので、指先でストローを持たずに飲む事が出来る



片手まな板

〈使用方法〉

まな板の端に取り付けたフォークに材料を突き刺して固定する



〈特徴〉

切る材料の固定方法が水平方向なので安全に作業出来る



対象

頸椎損傷やリウマチなどのため握る力がなかつたり、指が曲がらない方