


シートベルトはずし(2017.4.6)

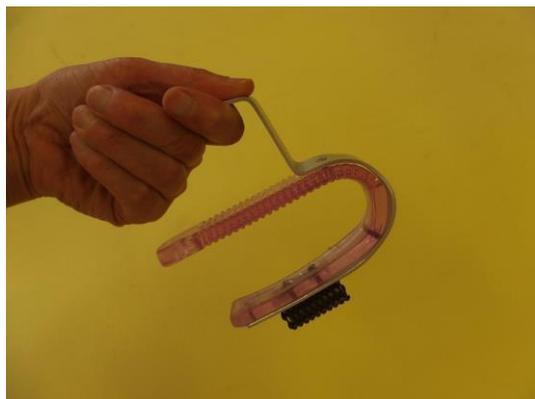

<特徴>

両手の指を全て切断された方が、自動車のシートベルトのロック解除ボタンを押すための自助具です。参考写真のように自助具を持ち、黒い滑り止めのゴムを貼ってある部分で、解除ボタンを押します。

<ワンポイントアドバイス>

自動車の車種に合わせて、解除ボタンを押すパーツの形状を変えます。

車いすの足こぎ用靴 (2017.4.12)



<特徴>

屋内用車いすを靴の底が滑らずに、足だけでこげるようになりたい、というニーズに対応しました。まず市販の靴が脱げないようにマジックテープ式のベルトをつけました。そして、靴の底には、滑り止めとして卓球のラケット用ラバーを貼りました。

<ワンポイントアドバイス>

市販の靴を改良することにより、好みのデザインや色の靴を選べます。

長柄ボディタオル (2017.4.25)



<特徴>

片手で背中を洗いやすいように、市販のボディタオルにアルミニウムのパイプで角度をつけた長い棒を取り付けました。持ち手の部分は、柔らかくて太いラバーを取り付けてあります。

<ワンポイントアドバイス>

利用者に合わせて、柄の長さや角度、持ち手の形状を変えます。

吸盤付きスポンジ (2017.4.25)



<特徴>

脳卒中などの方が麻痺していない腕を洗うための自助具です。お風呂の壁や浴槽の外側に吸盤でスポンジを取り付け、麻痺していない腕を動かして洗います。長柄ボディタオルと併用することにより、片手で全身を洗うことができます。

<ワンポイントアドバイス>

スポンジを安定させるために吸盤の数を増やすことがあります。

吸盤付き食器洗い器(2017. 5. 30)



<特徴>

片手で皿やコップなどの食器を洗うための自助具です。市販のコップ洗いを2本、吸盤付きのベースに固定してあります。スポンジを2つ付けてあるので、食器の内側と外側を同時に洗うことができます。

<ワンポイントアドバイス>

使う方にあわせてスポンジの形状や長さを変更します。

リーチャー (2017. 6. 2)



<特徴>

手の届かないところのものを取る時などに、リーチを補う自助具です。「つまむ」タイプと「ひっかける」タイプに分かれます。今回、制作したリーチャーは、手元のハンドルを握ると「つまむ」タイプです。

<ワンポイントアドバイス>

どのような目的で使用するかによって、形状やタイプが異なってきます。

車いすテーブル(2017. 6. 2)



拡大写真

<特徴>

スケッチブックやペットボトル、そしてアイスクリームのカップを置けるテーブルをつけたいというニーズに対応しました。サイドガードとレッグサポートでテーブルを支え、傾かないようにロック機能を付けました。スケッチブックを置く台は角度を調整でき、取り外したり左右に位置を変えることもできます。コップとアイスクリームのカップの直径が異なるため、穴をそれぞれ開けました。

<ワンポイントアドバイス>

利用者のニーズや車いすの形状に合わせて、テーブルを製作します。

ランドセル・連結ベルト (2017. 6. 15)



<特徴>

なで肩のためランドセルがずり落ちてしまうという小学1年生のニーズに対応しました。ランドセルの左右のベルトを連結することにより、ずり落ちなくなりました。

<ワンポイントアドバイス>

利用者の体格やランドセルの形状に合わせて製作します。